

LA NOTICE DE CET EMBALLAGE RENFERME DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET CONCERNANT L'UTILISATION DU PRODUIT. LISEZ-LA ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LA COMME FUTURE RÉFÉRENCE.

# SOLO CARE AQUA®

Solution tout-en-un

**INDICATIONS/MODE D'ACTION** La solution tout-en-un de soin des lentilles nettoie, rince, désinfecte, conserve et lubrifie les lentilles cornéennes souples (hydrophiles) notamment les lentilles en hydrogel de silicone, selon les recommandations de votre professionnel des soins de la vue. SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un sert également à déprotéiniser les lentilles quotidiennement lorsqu'elles sont trempées pendant un minimum de quatre (4) heures. Avec l'utilisation quotidienne de la solution, aucun besoin d'une autre solution nettoyante.

L'étui à lentilles MicroBlock® de SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un sert à ranger les lentilles cornéennes souples (hydrophiles) notamment les lentilles d'hydrogel de silicone. Les propriétés antimicrobiennes de l'étui visent à réduire la croissance des micro-organismes sur l'étui.

**INGRÉDIENTS** La solution unique SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un est une solution aqueuse isotonique stérile contenant du polyhexanide 0,0001 % (p/v).

Un (1) étui à lentilles MicroBlock® de SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un est compris.

**MODE D'EMPLOI** Pour garantir une bonne désinfection de vos lentilles cornéennes, respectez les directives suivantes dans leur intégralité. N'oubliez aucune des étapes.

- (1) Lavez et rincez-vous les mains, et séchez-les avec une serviette propre, non pelucheuse, avant de manipuler vos lentilles.
- (2) Déposez au moins 3 gouttes de SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un sur chacune des surfaces de la lentille et frottez délicatement pendant un minimum de 10 secondes.
- (3) Rincez les deux surfaces de la lentille avec SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un pendant au moins 10 secondes.
- (4) Déposez les lentilles dans l'étui MicroBlock® vide et remplissez-le jusqu'à la ligne avec de la solution SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un fraîche en couvrant bien les lentilles. Répétez les étapes précédentes pour la deuxième lentille. Remettez les capuchons et vissez bien.
- (5) Laissez tremper vos lentilles pendant un minimum de 5 minutes ou toute la nuit. Après le trempage, elles sont prêtes à l'utilisation. Au besoin, utilisez de la solution SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un fraîche pour rincer les lentilles avant la pose.
- (6) Videz toujours votre étui MicroBlock® et jetez toute solution restante après chacun des cycles de désinfection. Puis rincez votre étui à lentilles MicroBlock® avec de la solution SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un fraîche et refermez-le.

**CONSERVATION DES LENTILLES, SOLUTION ET ÉTUI À LENTILLES** Il est possible de conserver les lentilles dans la solution SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un dans l'étui à lentilles fermé pour une période allant jusqu'à 30 jours après une désinfection (trempage). Tous les 30 jours, jetez la solution de l'étui à lentilles. Au moyen de solution fraîche, répétez les étapes de frottage, de rinçage et de trempage comme décrites ci-dessus avant de réinsérer vos lentilles.

Conservez la solution SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un et l'étui à lentilles MicroBlock® à température ambiante (de 15 °C à 30 °C).

**CONTRE-INDICATIONS** (motifs de non-utilisation)

En cas d'allergie à l'argent ou à tout autre métal ou ingrédient de la solution, ne pas utiliser ce produit.

**AVERTISSEMENTS**

- Utilisez toujours de la solution SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un fraîche pour chacun des désinfections. Ne jamais réutiliser la solution ni ajouter de la solution fraîche à de la vieille solution.
- Utilisez uniquement la solution SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un avec vos lentilles et l'étui à lentilles. Ne pas utiliser l'eau du robinet ou en bouteille ni de la salive.
- Utilisez toujours la solution SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un avec l'étui à lentilles MicroBlock®. Ne substituez pas un composant avec un autre composant d'un système de soin des lentilles différent.
- En cas d'irritation provoquée par l'utilisation de ce produit, cessez l'utilisation et consultez votre professionnel des soins de la vue.
- Ne touchez pas la pointe de la bouteille à une surface quelconque. Cela risque de contaminer la solution. Maintenez toujours la bouteille bien fermée.

Le non-respect des directives de votre professionnel des soins de la vue et de toutes les directives inscrites sur l'étiquette pourrait entraîner des infections graves aux yeux ou la cécité. Un diagnostic et un traitement rapides sont essentiels. Pour cette raison, en cas de symptômes inhabituels ou des réactions adverses énumérées ci-dessous, retirez immédiatement vos lentilles et communiquez avec votre professionnel des soins de la vue.

**PRÉCAUTIONS**

- Remplacez votre étui à lentilles MicroBlock® à chaque achat de SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un ou selon les recommandations de votre professionnel en soins de la vue.
- Utilisez SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un avant la date de péremption inscrite sur la bouteille.
- Tenez hors de portée des enfants.
- Selon les données disponibles, les étuis à lentilles sont une source importante de contamination microbienne. Il est donc primordial de bien nettoyer l'étui à lentilles afin de minimiser les risques associés aux infections oculaires provoquées par le port de lentilles. Reportez-vous au mode d'emploi pour connaître les soins d'entretien corrects de l'étui.
- Il est possible que l'étui à lentilles MicroBlock® se décolore légèrement avec le temps. Cette décoloration n'affecte en rien les propriétés antimicrobiennes de l'étui à lentilles.
- N'utilisez jamais SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un pour la désinfection avec chaleur.

**RÉACTIONS ADVERSES** (problèmes éventuels et solutions)

Voici les problèmes qui pourraient survenir : irritation oculaire (yeux qui picotent ou brûlent), réduction du confort du port de la lentille en comparaison à la première utilisation, sensation de présence d'un corps étranger dans l'œil (égratignure en surface), larmolement excessif, sécrétions oculaires inhabituelles, rougeurs des yeux, réduction de l'acuité visuelle (vision moins précise), vision floue, halos ou arc-en-ciel autour des objets, sensibilité à la lumière (photophobie) ou yeux secs.

**Si vous remarquez un des problèmes décrits ci-dessus : RETIREZ IMMÉDIATEMENT VOS LENTILLES**

- Si l'inconfort ou le problème cesse dès le retrait, examinez attentivement la lentille.
- Si elle est endommagée d'une manière ou d'une autre, NE la remettez PAS dans l'œil. Placez la lentille dans l'étui à lentilles et communiquez avec votre professionnel des soins de la vue.
- En présence de saleté, d'un cil ou d'un autre corps étranger sur la lentille ou si le problème cesse et que la lentille semble intacte, nettoyez bien la lentille, rincez-la et désinfectez-la puis remettez-la sur votre œil.
- Si le problème persiste, retirez immédiatement la lentille et consultez sans tarder votre professionnel en soins de la vue.

**Professionnels** veuillez signaler toutes les réactions adverses observées à l'utilisation de SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un à :

Menicon Co., Ltd.

3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan

**CONDITIONNEMENT** SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un est une solution stérile offerte en contenants refermables de plastique de 90 et 360 ml. Les bouteilles et les emballages sont identifiés par un numéro de lot et une date de péremption.

Un (1) étui à lentilles MicroBlock® de SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un est fourni avec chacune des bouteilles de solution unique SOLOCARE AQUA® Solution tout-en-un.