



Para todos los usuarios de R.P.G Piensa sólo en MeniCare Plus & Progent

*Limpieza
Desinfección
Conservación
Aclarado
Humectación*

Efectivo contra
Acanameba
(quistes y trophozoites)
en 2 horas*

Para uso diario,
Sólo 5 minutos
Con MeniCare Plus,
Solución multiusos



Para asegurar el máximo confort con las lentes RPG

Hipromelosa,

Agente humectante e hidratante, crea una película protectora en la superficie

Presentación:

- MeniCare Plus 250 ml (incluye estuche de lentes RPG)
- MeniCare Plus 125 ml (incluye estuche de lentes RPG)
- Kit : MeniCare Plus 50 ml, estuche de lentes RPG, 1 dosis Progent A+B, estuche Progent

Composición:

- Polihexametileno biguanida 0.0005%
- Poloxámero 0.5%
- Hipromelosa 0.275%
- Alcohol polihídrico, EDTA, excipiente 100ml

CE 0483 Fabricante : Menicon Pharma 67400 Illkirch - Graffenstaden France

*(Departamento de microbiología e inmunología de Leicester UK)



Fabricante:

Menicon Co., Ltd.

21-19 Aoi 3 chome Naka- Ku,
Nagoya 460-0006 JAPAN
TEL : +81 (0) 52-937-5021
FAX : +81(0) 52-935-1121

CE 0483

Para más información:

Menicon España

Mallorca 277
08037 Barcelona - SPAIN
TEL : +34 (0) 93 272 13 69
FAX : +34 (0) 93 272 13 71
menicon@wanadoo.es

**Menicon Europe
Menicon France**

104 rue Martre
92583 Clichy Cedex - FRANCE
TEL : +33 (0)1 41 40 19 19
FAX : +33 (0)1 41 40 19 20
serviceclients@menicon-france.fr
www.menicon-europe.com

Menicon GmbH

Odenwaldring 44
63069 Offenbach - GERMANY
TEL : +49 (0) 69 84000810
FAX : +49 (0) 69 84000819
auftragsannahme@menicon.de
www.menicon.de

Menicon UK Ltd.

Westec Level 7, West Gate
Ealing London W 5 1YY
TEL : 44 (0) 20 8799 0390 /0391
FAX : 44 (0) 20 8799 0392
customerservice@menicon.co.uk
www.menicon.com



Para todos los usuarios de R.P.G **Piensa sólo en Progent & MeniCare Plus**

Eliminador de proteínas, desinfectante y limpiador intensivo
Compatible con todas las lentes de contacto RPG

- Una vez por semana para uso diario de lentes RPG
- Al quitar las lentes RPG en uso continuo (7 días hasta 30 días...)



Cómo usar Progent (Leer las instrucciones atentamente)

- Mezclar las dosis A y B en el estuche Progent
- **Poner en remojo las lentes durante 30 minutos**
(Dejarlas en remojo más de 30 minutos puede decolorar las lentes)
- Aclarar las lentes y el estuche abundantemente al menos durante 15 segundos con Menicare Plus

Está probado que Progent es extremadamente efectivo en sólo 5 minutos
 contra las bacterias, hongos, virus, Acantameba*
 y contra el prion en 30 minutos**

Presentación: Menicon Progent 5 tratamientos (5 dosis de cada, Progent A y B, 1 estuche Progent)

- Kit : 1 dosis de cada Progent A y B, 1 estuche Progent,
 1 Menicare Plus de 50 ml, 1 estuche de lentes RPG

Composición: dosis A / hipoclorito de sodio
 dosis B / bromuro de potasio

☎ 0483 Fabricante Menicon Pharma 67400 Illkirch- Graffenstaden France

*cf pruebas de desinfección :
 eficacia antiviral (Medical University Nancy MDT, referencia : CEN / TC 216 / N 98, AFNOR NFT 72-180)
 actividad antibacteriana y antifúngica (MENICON PHARMA ref : ISO / CD 14729 stand alone test),
 actividad anti-acantameba (Bactériology institute, Strasbourg medical University ;
 Menicon co.,Ltd / departamento de microbiología e inmunología de Leicester UK).

**cf actividad anti-prion (N° 277111 report junio 2002, C.E.A. / SPI BIO / MENICON) con un procedimiento de aplicación que elimina el prion.

