


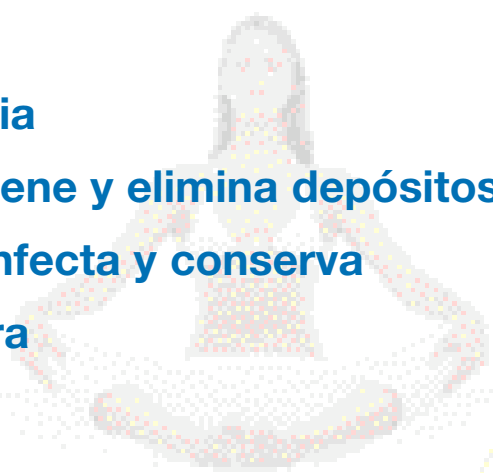

Solución multiusos sin frotar para todo tipo de lentes blandas

- Limpia
- Previene y elimina depósitos de proteínas
- Desinfecta y conserva
- Aclara



50 ml



360 ml



2 x 360 ml

Sólo aclarar y guardar...



Fabricante :

Menicon Co., Ltd.

21-19 Aoi 3 chome Naka- Ku,
Nagoya 460-0006 JAPAN
TEL : +81 (0) 52-937-5021
FAX : +81(0) 52-935-1121

CE 0483

Para más información :

Menicon Espana

Mallorca 277
08037 Barcelona - SPAIN
TEL : +34 (0) 93 272 13 69
FAX : +34 (0) 93 272 13 71
menicon@wanadoo.es

**Menicon Europe
Menicon France**

104 rue Martre
92583 Clichy Cedex - FRANCE
TEL : +33 (0)1 41 40 19 19
FAX : +33 (0)1 41 40 19 20
serviceclients@menicon-france.fr
www.menicon-europe.com

Menicon UK Ltd.

Westec Level 7 ,West Gate
Ealing London W 5 1YY
TEL : 44 (0) 20 8799 0390 /0391
FAX : 44 (0) 20 8799 0392
customerservice@menicon.co.uk
www.menicon.com

Menicon GmbH

Odenwaldring 44
63069 Offenbach - GERMANY
TEL : +49 (0) 69 84000810
FAX : +49 (0) 69 84000819
auftragsannahme@menicon.de
www.menicon.de

Seguridad y confort : no todas las soluciones de mantenimiento para lentes blandas son iguales !



Descubra Comfortec™, la fórmula innovadora de Menicare™ Soft, la solución multiusos sin frotar para todos los usuarios de lentes blandas



Seguridad

Comfortec™ : es la asociación de de 4 agentes complementarios



Acción Comfortec™ por interacción iónica

- con Polihexanida para mejor seguridad y mayor desinfección
- con lisozima para prevenir la adhesión de proteínas

por unión de hidrógeno

- con más moléculas de agua para una mejor hidratación

Mejoras

MACROGOL HCO- 60


Asociación Tenso-Activa para eliminar los depósitos

POLIHEXANIDA y el efecto desinfectante de polihexanida para usar sin frotar.

Desinfección sinérgica

ISO 14729 Stand alone test

Menicare™ Soft cumple la norma para una solución desinfectante en 20 minutos

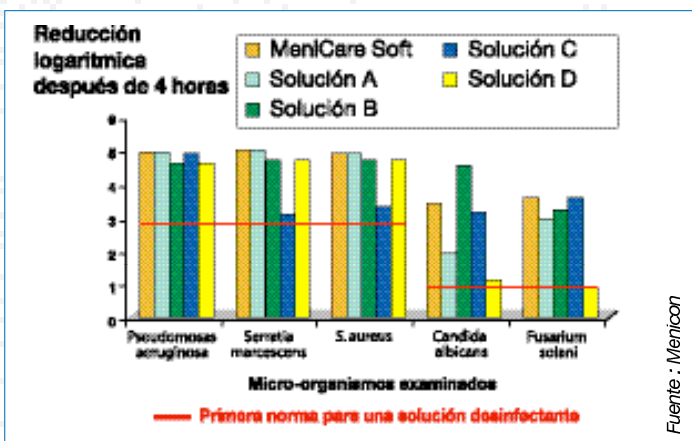

Compatibilidad con lentes blandas

Datos clínicos en Hidrogeles de silicona


Confort subjetivo, agudeza visual y signos de seguridad corneal y conjuntival confirman la **compatibilidad con lentes de silicona-hidrogel***

Comparando resultados de pacientes usando:

- MeniCare™ Soft (Comfortec™ - Polihexanida) durante 1 mes
- versus Solución E testigo durante 1 mes


**20 pacientes adaptados con Acuvue Advance Johnson&Johnson Vision Care
21 pacientes adaptados con Focus Night&Day CIBA Vision*

Las columnas representan el 25 - 75 centiles y las barras indican el 10 - 50 centiles (los datos que se salen están representados por un punto). La mediana y la media están representadas por una línea horizontal y un rombo respectivamente, dentro de la cada rectángulo.

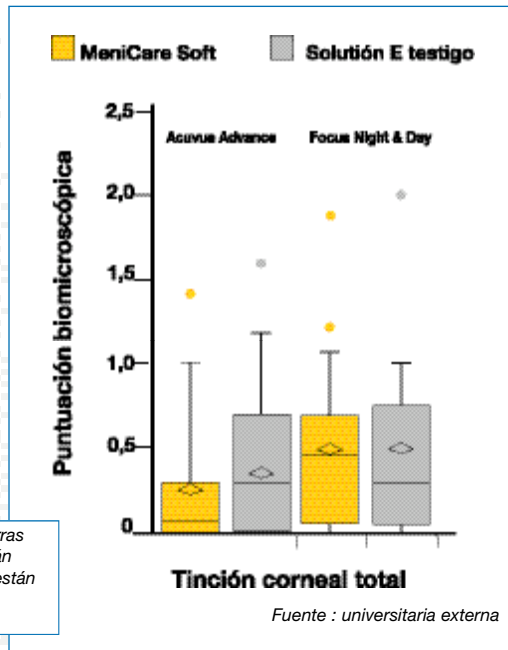

Máxima seguridad en células corneales

Midiendo in vitro la concentración que reprime la formación de colonias al 50 % del valor de control : a mayor IC₅₀* significa máxima seguridad en el crecimiento de células, más baja citotoxicidad

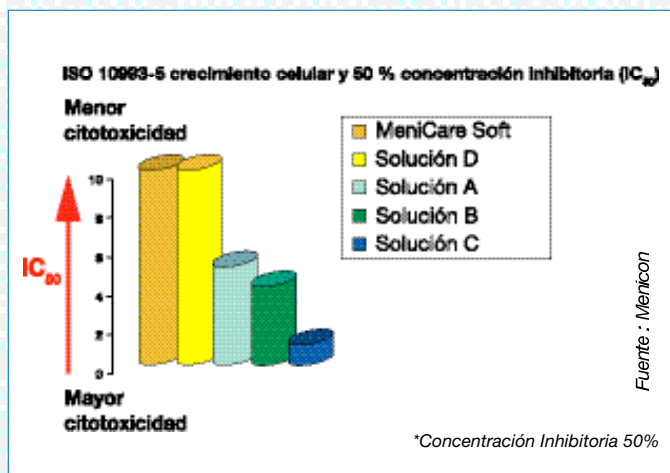

Efectividad anti-acanthamoeba y anti-virus

La solución MeniCare™ Soft es un producto desinfectante efectivo stand-alone contra la Acanthamoeba patogénica free-living y el virus patógeno HSV-1*. También es eficaz, cuando se usa como solución sin frotar y para aclarar, eliminar virus patógenos** de lentes de contacto blandas (reducción 4-5 log)

(Fuente : Dr Kilvington BCLA 2005)

*Virus y Amoebas probados: A. Pflifaga, A. Castellanii, quistes y trofozooides, / Virus Herpes simples tipo 1 (ISO 14729 stand alone test)

** Patógenos víricos probados: Virus Herpes Simples tipo 1, Poliovirus tipo 2 y adenovirus tipo 8 (regimen test)