



MeniconEX

Material Menicon EX (Tolofocón A)

Copolímero de FMA / SIMA / MA

(Fluorometacrilato, siloxanilmetacrilato, ácido metacrílico)


Coloración : Azulada

Dk : 64×10^{-11} (cm²/sec) [mlO₂/(ml . mmHg)] ISO 9913-1

Dk : 85×10^{-11} (cm²/sec) [mlO₂/(ml . mmHg)] (FATT)

Geometría esfero-asférica

Dk/e : 43×10^{-9} (ISO)

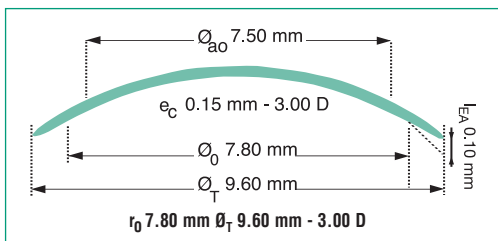

Gama de lentillas

ESTANDAR

$\varnothing_T$	8.80	9.20	9.60	10.00	10.50	11.00 mm
r_0	6.50		7.20 a 8.40		9.00 por 0.05 mm	
F'_v	- 25.00		-10.00 a +5.00		+ 25.00 por 0.25 D	

Otras posibilidades de fabricación bajo pedido

Regla de adaptación

$r_0 = K$ $\begin{cases} \text{córnea esférica} & r_0 = K + 0.05 \\ K - K' < 0.20 \text{ mm} \\ \text{córnea muy astigmática} & r_0 = K - 0.05 \\ K - K' > 0.40 \text{ mm} \end{cases}$

$\varnothing_T$ 9.60 mm

K = el radio más plano de la córnea

Indicaciones

Lentilla rígida permeable al oxígeno de Dk medio que corrige la miopía, la hipermetropía y / o el astigmatismo corneal :

aconsejada en principio :

- insuficiencia lagrimal
- en caso de intolerancia a las lentillas blandas
- en presencia de alergias
- para córneas deformadas irregulares (post cirugía, post-traumatismo...)
- para los niños

uso diario

Renovación aconsejada

< 2 años

Mantenimiento

Para el cuidado diario MENICARE PLUS, solución multiusos. En asociación con PROGENT una vez por semana.

(ver noticia de utilización de estos productos)

Envasado

Frasco que contiene una lentilla en una solución acuosa de P.H.M.B.

Al abrir el frasco, vaciar la solución y aclarar la lentilla antes de ponerla.

Fabricante : **Menicon Co., Ltd.** Nagoya Japan

Para cualquier información :

Menicon España

Mallorca 277

08037 Barcelona

TEL +34 (0) 93 272 13 69

FAX +34 (0) 93 272 13 71

menicon@wanadoo.es

Menicon Europe

104 rue Martre

92583 Clichy Cedex - F

TEL + 33 (0)1 41 40 19 00

FAX + 33 (0)1 41 40 19 20

www.menicon-europe.com

E0141005/5