

Importante: Este folleto contiene información, por favor léala

Introduccion

Ud es usuario de lentillas blandas hidrofílicas

Wenicon soft MA Wenicon soft 72 o.

Wenigon soft 72 Tórica

▲ Las lentillas **Menicon soft MA** contienen un 38 % de aqua.

Son especialmente fáciles de manipular y de usar.

▲ Las lentillas **_Menicon soft 72** y.

Menicon soft 72 Tórica tienen una hidrofilia del 72 %.

Esta alta hidrofilia le garantiza a la vez un confort excelente y un aporte de oxígeno suplementario a su cómea.

La geometría escogida respeta el metabolismo comeal, y optimiza el confort de uso.

Acondicionamiento : estas lentes de contacto se entregan estériles, acondicionadas dentro una solución salina.

Lea atentamente los consejos de utilización, de manipulación y mantenimiento, para mantener las cualidades de visión y confort de sus lentillas, y su seguridad ocular. Para toda informacion respecto al uso de lentes de contacto,pregunte a su especialista.

Indicaciones

Las lentillas blandas hidrofilicas Menicon están indicadas para el uso diario, para la correción de la miopía, de la hipermetropía y /o del astigmatismo, y de la afaquia.

Estas lentillas deben limpiarse todos los días y sacarse para dormir.

Frequencia de reemplazo

Menicon recomienda renovar las lentillas cada año

Contra indicaciones

Las lentillas blandas hidrofílicas Menicon estan contra-indicadas en los casos siguientes :

- ▲ Inflamación o infección de la cámara anterior del ojo
- ▲ Enfermedad, lesión o problema que afecte a la córnea, la conjuntiva o los párpados
- ▲ Hypoestesia comeal (sensibilidad comeal reducida)
- ▲ Enfermedad sistemática que concierna al ojo o se agrave por el uso de las lentillas
- Reacciones alérgicas oculares producidas por el uso de lentillas o la utilización de los productos de mantenimiento
- ▲ Infección comeal (de origen bacteriano, vírico o por hongos)
- ▲ Ojo rojo o irritado
- ▲ Cicatrización incompleta después de cirurgía ocular.

Antes de poner y quitar

- Antes de cualquier manipulación, lávese cuidadosamente las manos y séquelas con una toalla sin pelusa
- Prepare el estuche, el frasco o frascos de solución y un espejo
- Manipule cuidadosamente sus lentillas, evitando el contacto con las uñas
- Manipule siempre una sola lentilla, empezando siempre por el mismo ojo (derecho/izquierdo)
- **5** Cierre el desagüe del lavabo

Poner

 Aclare cuidadosamente la lentilla derecha al sacarla del estuche



- 2 Coloque la lentilla derecha sobre el índice de la mano derecha
- Devante el párpado superior con el dedo medio de la mano izquierda y baje el párpado inferior con el dedo medio de la mano derecha

Ponga la lentilla en la parte inferior del ojo, mirándo hacia arriba y apoyándo la suavemente

 A continuación es suficiente en mirar hacia abajo, y la lentilla se centra por sí sola



La lentilla izquierda se pone de la misma manera

Para verificar que sus lentillas están al derecho y no al revés (sensación de incomodidad al poner):



Cuando mire dentro de la lente, el indicador, (la cifra) debe leerse al derecho.

Quitar

- Asegúrese que la lentilla esté bien centrada sobre el ojo
- Después de haber bajado el párpado inferior, pose el dedo índice sobre la lentilla, y hágala resbalar hacia abajo, sobre la parte blanca del ojo que es poco sensible



- A coninuación pellizque ligeramente la lentilla entre el pulgar y el índice para despegarla: sale facilmente
- Proceda con el sistema de mantenimiento





Mantenimiento

Siga atentamente los consejos dados por su especialista:

- Para la limpieda diaria, utilice MeniCare Soft, solución única (lea atentamente el modo de uso antes de utilizaria) o cualquier tipo de sistema de mantenimiento para lentes blandas que le alonseje su especialista
- A Para quitar las proteínas, utilize semanalmente pastillas enzimáticas
- ▲ No utilize nunca productos para lentillas rígidas.
- ▲ Respete el tiempo de uso recomendado después de abrir el frasco y la fecha de caducidad.
- Cambie todos los días la solución del estuche.
- Si no utiliza sus lentillas durante varios días, consérvelas en un estuche bien cerrado 11eno de solución
- ▲ El estuche es una fuente importante de contaminación : Guárdelo siempre limpio y renuévelo con frecuencia.(como mínimo cada tres meses)
- ▲ No utilize nunca agua del grifo o saliva para conservar o aclarar sus lentillas.

Precauciones

- Conserve sus lentillas en el estuche 11eno de solución. No las deje secar nunca. En caso de secarse de modo accidental, para rehidratarlas, déjelas en remojo al menos una hora en la solución.
- Utilize sólo las soluciones de mantenimiento recomendadas. Otra solución podría deteriorar sus lentillas.
- Evite el contacto de cosméticos, lacas, perfumes o medicamentos con sus lentillas.
- 4. Respete el tiempo de uso recomendado por su especialista.
- 5. No mantega sus lentillas para dormir o en la piscina.
- 6. Cierre los ojos cuando se ponga laca.
- Maquillese siempre después de ponerse las lentillas y dsesmaquillese después de quitárselas.
- No utilize sus lentillas en caso de tratamiento con colirios y hable anteriormente con su oculista.
- No ponga jamás sus lentillas en contacto con un líquido coloreado.
- 10. Respete las visitas de control.
- 11. Renueve cada año sus lentillas.

Atención

Si aparecen los siguientes síntomas :

- ▲ Ojo rojo, irritado
- Sensación de incomodidad, quemazón, dolor, o cuerpo extraño
- ▲ Cambio en la visión
- ▲ Aumento de la sensibilidad a la luz o halos
- ▲ Lagrimeo o secreciones abundantes
- ▲ Sensación de sequedad...
 - Ë Retire inmediatamente sus lentillas y consulte su oculista

Tiempo de uso

Respete los consejos de su especialista

- ▲ Durante el período de adaptación, aconsejamos utilizarlas seis horas diarias, después aumentar dos doras por día.
- ▲ No sobrepasar las doce horas de uso sin control de su especialista.
 - Después podrá, según sus recomendaciones, llevarlas alrededor de unas quince horas.
- ▲ Si se olvida de quitarse las lentillas para dormir, no se las saqueo inmediatamente, primero rehidrátelas, instilándose unas gotas de suero fisiológico estéril.

Para rellenar por su contactólogo

Nor	nbre de producto y pa	rámetros	
D	Menicon		
D	Lote:		
÷	Menicon	S √Nonicon	
1	Lote:		
		Care	
Pró	xima revisión :		S. Year

Dirección del centro de contactología :



Para cualquier información : www.menicon.es
Menicon España Mallorca, 277 08037 Barcelona

Fabricante :
Menicon Co., Ltd. Nagoya Japan

Representente autorizado en la comunidad europea
Menicon Holdings Europe F92583 Clichy Cedex
Tél : +33 1 41 40 19 19

MANUAL DE UTILIZACION PARA EL USUARIO LENTES BLANDAS HIDROFILICAS



