



Lentilla cerrada

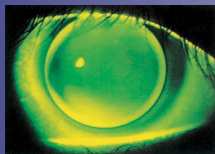

Lentilla óptima

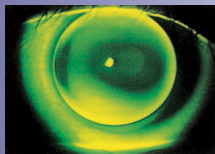

Lentilla plana

REGLAS DE ADAPTACIÓN

Lentillas Menicon	K - K' < 0.20 mm Ast. corneal < 1.00 D	Elección r ₀	K - K' > 0.40 mm Ast. corneal > 2.00 D
		0.20 ≤ K - K' ≤ 0.40 1.00 D ≤ Ast. corneal ≤ 2.00 D	
Menicon EX 9.60	K + 0.05	K	K - 0.05
Menifocal Z 9.80	K + 0.05	K	K - 0.05
Menicon Z asférica	K + 0.10	K	K - 0.10
Menicon Z -α 9.20	K + 0.10	K + 0.05	K
Menicon Z -α 9.60	K + 0.15	K + 0.10	K + 0.05

Recordatorio : K radio más plano - K' rado más cerrado



Menicon España SERVICIO TÉCNICO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. 93 272 1369 - Fax 93 272 1371 - menicon@wanadoo.es

RECORDATORIO ...

CAMBIAR EL RADIO ...

- Aumentar el r_0 es aplanar la adaptación
- Disminuir el r_0 es cerrar la adaptación
(cambiar la potencia !)

Exemplo : 8.00 / 9.60 / - 3.00

- ➔ Lentilla más plana : 8.05 / 9.60 / - 2.75
- ➔ Lentilla más cerrada : 7.95 / 9.60 / 3.25

CAMBIAR EL DIÁMETRO ...

- Aumentar el $\varnothing_T$ es cerrar la adaptación
- Disminuir el $\varnothing_T$ es aplanar la adaptación

Exemplo : 8.00 / 9.60 / - 3.00

- ➔ Lentilla más cerrada : 8.00 / 10.00 / - 3.00
- ➔ Lentilla más plana : 8.00 / 9.20 / - 3.00

CAMBIAR RADIO Y DIÁMETRO ...

Para mantener la misma adaptación y la misma imagen fluo centrada

- Aumentar radio y diámetro
o
- Disminuir radio y diámetro

Exemplo de 3 lentillas con la misma imagen fluo

8.05 / 10.00 / - 2.75

8.00 / 9.60 / - 3.00

7.95 / 9.20 / - 3.25

UN CAMBIO EN EL RADIO ➔ UN CAMBIO EN LA POTENCIA

± 0.05 mm



± 0.25 D

± 0.10 mm



± 0.50 D

TABLA DE CONVERSIÓN
DISTANCIA DE VÉRTICE = 13 MM

Refracción en gafa + 0 -	Potencia en lentilla +	Potencia en lentilla -	Refracción en gafa + 0 -	Potencia en lentilla +	Potencia en lentilla -
4.00	4.25	4.00	11.25	13.00	9.75
4.25	4.50	4.00	11.50	13.50	10.00
4.50	4.75	4.25	11.75	13.75	10.25
4.75	5.00	4.50	12.00	14.00	10.50
5.00	5.25	4.75	12.25	14.25	10.75
5.25	5.50	5.00	12.50	14.75	10.75
5.50	5.75	5.25	12.75	15.00	11.00
5.75	6.00	5.50	13.00	15.50	11.25
6.00	6.50	5.50	13.25	15.75	11.50
6.25	6.75	5.75	13.50	16.25	11.50
6.50	7.00	6.00	13.75	16.75	11.75
6.75	7.25	6.25	14.00	17.00	12.00
7.00	7.50	6.50	14.25	17.25	12.25
7.25	8.00	6.75	14.50	17.75	12.50
7.50	8.25	7.00	14.75	18.00	12.50
7.75	8.50	7.00	15.00	18.50	12.75
8.00	8.75	7.25	15.25	18.75	12.75
8.25	9.00	7.50	15.50	19.00	13.00
8.50	9.50	7.75	15.75	19.50	13.25
8.75	9.75	8.00	16.00	19.75	13.25
9.00	10.00	8.25	16.25	20.00	13.50
9.25	10.50	8.25	16.50	20.50	13.75
9.50	10.75	8.50	17.00	21.50	14.00
9.75	11.00	8.75	17.50	22.50	14.50
10.00	11.50	9.00	18.00	23.00	14.75
10.25	11.75	9.00	18.50	24.00	15.00
10.50	12.25	9.25	19.00	25.00	15.25
10.75	12.50	9.50	19.50	26.50	15.50
11.00	12.75	9.75	20.00	27.00	16.00