

Comfort BTC/BT Art.-Nr. 1273/1274

bitorisch kompensiert /bitorisch – mit hohem Tagekomfort

Comfort Symbio BTC/BT Art.-Nr. 1292/1293

bitorisch kompensiert /bitorisch – mit hohem Tagekomfort und Akkommodationsentlastung

Material:

Z

- Dk: 163
- Handlingstint eisblau

EX

- Dk: 64
- Handlingstint eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MeniCare Pure
+ wöchentlich Progent Intensivreiniger



Eigenschaften:

- Großer Durchmesser, Standard 10,60 mm
- Tränenreservoir
- Tangentiale Randgestaltung
- **Option Symbio, asphärische Vorderfläche**


Vorteile:

- ▶ Hoher Tragekomfort und gute Zentrierung
- ▶ Verbesserter Tränen austausch
- ▶ Geringes Linsenempfinden
- ▶ **Akkommodationsentlastung**

Design:

Rückfläche

- Zentral torische optische Zone, umgeben von einer Tränenreservoirzone
- Periphere tangential verlaufende Auflagezone für eine optimale Zentrierung

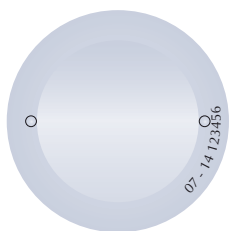

Vorderfläche

- Torisch, zur Korrektur des induzierten Astigmatismus/ Restzylinders
- 2 Punktgravuren markieren die Lage des flachen Rückflächenradius
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur
- Symbio-asphärische Vorderfläche

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm) ab Δr 0,30 mm	Durchmesser (mm)		
$r_{(flach)}$ = parallel zum flachen HH-Meridian	10,20	10,60	11,00
$r_{(steil)}$ = steiler HH-Meridian +0,10 mm	HH-Durchmesser bis 11,60	HH-Durchmesser 11,70 bis 12,00	HH-Durchmesser ab 12,10

Lieferbereich:

Basiskurve BT (mm)	Wirkung Sph (dpt)	Durchmesser (mm)	BT Cyl. (dpt)
$r_{(flach)}$ 7,00 bis 9,95 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	10,20 / 10,60 / 11,00	0,00 bis -6,00 in 0,25 dpt Abstufung, Achse von 0° bis 180° in 1° Abstufung
$r_{(steil)}$ 0,20 bis 1,00 steiler als $r_{(flach)}$ in 0,05 mm Abstufung			

Basiskurve BTC (mm)
$r_{(flach)}$ 6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abstufung
$r_{(steil)}$ 0,20 bis 1,00 steiler als $r_{(flach)}$ in 0,05 mm Abstufung