

Comfort Art.-Nr. 1252

tagentiale Randgestaltung – hoher Tragekomfort

Comfort Symbio Art.-Nr. 1256

tagentiale Randgestaltung / asphärische Vorderfläche – hoher Tragekomfort und Akkommodationsentlastung

Material:

- Z**
- Dk: 163
 - UV Filter
 - Handlingstint eisblau

- EX**
- Dk: 64
 - Handlingstint eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate

Pflegeempfehlung:

MeniCare Pure
+ wöchentlich Progent Intensivreiniger



Eigenschaften:

- Großer Durchmesser
- Tränenreservoir
- Tangentiale Randgestaltung
- **Option Symbio: asphärische Vorderfläche**

Vorteile:

- ▶ Hoher Tragekomfort
- ▶ Optimaler Tränenaustausch
- ▶ Zentrischer Sitz
- ▶ **Akkommodationsentlastung**

Ideal für Neuträger und Umstellung
von weich auf formstabil.

Design:

Rückfläche

- Zentral sphärische optische Zone, umgeben von einer Tränenreservoirzone
- Periphere tangential verlaufende Auflagezone für eine optimale Zentrierung

Vorderfläche

- Große sphärische optische Zone, abhängig vom Scheitellbrechwert
- Herstellungsdatum und Lotnummer zur besseren Identifizierung
- Optional R/L Gravur
- Symbio-asphärische Vorderfläche

Weitere Informationen zum Comfort
Design finden Sie auf Seite 27.

Nutzen Sie **easyfit** oder richten Sie sich nach der Anpass-Empfehlung

Anpassung und Tipps:

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)		
parallel zum flachen HH-Radius, passen Sie ab 0,30 mm Radien- differenz eine torische Rückfläche an	10,20	10,60	11,00
	HH-Durchmesser bis 11,60	HH-Durchmesser 11,70 bis 12,00	HH-Durchmesser ab 12,10

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
6,50 bis 9,20 in 0,05 mm Abstufung	+25,00 bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	10,20 / 10,60 / 11,00