

Z Alpha E-1 Art.-Nr. 1255

EX E-1 Art.-Nr. 1231

Material:

- Z**
- Dk: 163
 - UV Filter
 - Handlingstint eisblau

- EX**
- Dk: 64
 - Handlingstint eisblau

Nutzungszeitraum:

12 bis maximal 18 Monate


Pflegeempfehlung:

MeniCare Pure
+ wöchentlich Progent Intensivreiniger



Einsatzgebiet:

- Bei großem ausgedehntem Konus

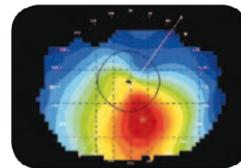

Design:

Rückfläche

- Zentral sphärische optische Zone
- Mehrkurvige, stark abflachende Peripherie

Vorderfläche

- Große sphärische optische Zone

Anpassung und Tipps:

HH-Radien	Basiskurve
Gute Messbarkeit der Hornhautradien	flacher HH-Radius +0,10mm bis +0,30mm
Schlechte Messbarkeit der Hornhautradien	Basiskurve 6,50mm bis 6,20mm

Lieferbereich:

Basiskurve (mm)	Wirkung (dpt)	Durchmesser (mm)
5,00 bis 5,45	plan bis -25,00 in 0,25 dpt Abstufung	8,40
5,50 bis 5,95		8,60
6,00 bis 7,40		8,80
in 0,05 mm Abstufung		